

НАЗНАЧЕНИЕ

Клей медицинский «Сульфакрилат» (далее по тексту - клей) предназначен для склеивания мягких тканей живого организма в общей хирургии, а также в хирургической стоматологии, пародонтологии:

Показания к применению «СУЛЬФАКРИЛАТ»	Вид операции	Назначение
Эрозия слизистой	-	Защитная антисептическая повязка
Удаление зуба с одномоментным закрытием соустья гайморовой пазухи	Пластика соустья гайморовой пазухи	Защитная послеоперационная антисептическая повязка в области дефектов слизистой донорских участков; капиллярный гемостаз; профилактика вторичной инфекции; герметизация узловых швов.
Пародонтит хронический	Открытый, закрытый кюретаж. Процедура иссечения (ПИНТ) и модифицирование ПИНТ.	Герметизация узловых швов; пародонтологическая повязка.
Гиперплазия десны, хроническая воспалительная гиперплазия тканей десны, наследственный фиброматоз.	Гингивотомия.	Защитная послеоперационная антисептическая повязка в области дефектов слизистой.
Хронический пародонтит	Гингвинопластика.	Герметизация узловых швов; пародонтологическая повязка.
Увеличение уровня патогенных микроорганизмов.	Лоскутные операции.	Защитная послеоперационная антисептическая повязка; герметизация узловых швов; пародонтологическая повязка.
Рецессия зубов	Пластика свободными десенными аутотрансплантатами (слизистыми, соединительно-тканными) с неба и альвеолярного гребня.	Создание адекватного сопоставления краев раны без образования мертвого пространства; защитная послеоперационная антисептическая повязка в области дефектов слизистой донорского участка; капиллярный гемостаз; профилактика вторичной инфекции.
Все виды пластический рецессий, дефектов альвеолярного гребня.	Латерально-Коронарно-Смещенный лоскут.	Защитная послеоперационная антисептическая повязка; герметизация узловых швов; пародонтологическая повязка.
Мелкоте преддверие, тяжи преддверия, кариес корня.	Аликально- смещенный лоскут	Защитная послеоперационная повязка в области дефекта; обеспечение правильной позиции лоскута; уменьшение доли в послеоперационном периоде; гемостаз.


Применение медицинского клея

«СУЛЬФАКРИЛАТ»

в стоматологической практике



PARCE DENTES

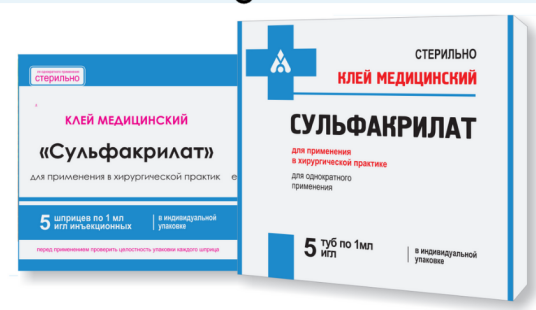

www.parce-dentes.com
+7 926 790-13-00

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Клей готов к применению без дополнительной подготовки!!!

Перед нанесением клея незначительно осушают рану стерильной марлевой салфеткой, тампоном, создавая некровоточащую поверхность. При кровотечении отдельных сосудов – рекомендована предварительная коагуляция или лигирование шовным материалом. Клей наносят на раневую поверхность каплями (1-2), не задевая слизистую иглой; клей растекается по очагу тонким слоем, при этом одновременно достигается гемостаз раневой поверхности. В течение 10 секунд удерживают подвижную слизистую от соприкосновения с участком нанесения клея, затем для предотвращения склеивания тканей между собой, врач орошает поверхность раствором водного антисептика, до получения резиноподобной матовой (непрозрачной или полупрозрачной) поверхности повязки. Отпустив ткани в исходное физиологическое состояние, проверяет застывание и положение повязки; удаляет избытки клея за пределами эрозии, не имеющие плотную адгезию к тканям.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЯ СУЛЬФАКРИЛАТ


Лоскутные операции (НКР в области зубов)
Забор СДТ, ССТ



Раскрытие имплантов, установка
формирователей десны



Удаление зубов

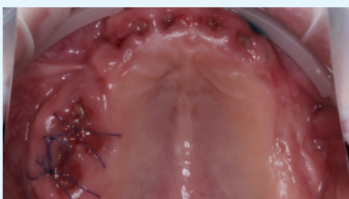

Иссечение новообразований

